

充電發熱護膝帶：HP-K58

使用說明書

產品簡介

多謝選用英國origo充電發熱護膝帶。正確使用，可使本產品持久耐用，但不適用於醫療用途。origo充電發熱護膝帶配備充電式鋰電池供應電源，使用者可靈活活動；另備有四個發熱溫度選擇。origo充電發熱護膝帶可以令你的膝部保持溫暖，穩定一致及均勻分佈的熱力能夠促進血液循環及舒緩肌肉疲勞。

* 使用本產品前，請閱讀使用說明書的安全指引。

部件名稱

- 1 充電發熱護膝帶
- 2 控制器連充電電池
- 3 充電電池袋
- 4 充電器連插頭
- 5 開關鍵
- 6 操作顯示燈



使用方法

充電發熱護膝帶的設計不適合寵物使用。不正確使用會破壞充電發熱護膝帶的表面及發熱線的裝置。如有損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

第一次使用前，請先將充電電池充電。將"充電器連插頭"插入獨立插座並同時接連"控制器連充電電池"。充電3-4小時可把充電電池充滿，綠燈同時亮起。充滿的充電電池可連續使用約90至210分鐘。

- a) 將"充電發熱護膝帶"插頭插進"控制器連充電電池"頂部插孔內；
- b) 按"開關鍵"連續兩秒啟動發熱帶；
- c) 再按"開關鍵"選擇所需熱度：
 - (1) 微熱(38 - 41 C) ○
 - (2) 低檔(42 - 46 C) ○
 - (3) 中檔(47 - 51 C) ○
 - (4) 高檔(52 - 55 C) ○
- d) 將"控制器連充電電池"放入"充電電池袋"；
- e) 將"充電電池袋"仗貼於"充電發熱護膝帶"旁的魔術貼上；
- f) 如需關閉發熱帶，按"開關鍵"連續兩秒。

保養

充電發熱護膝帶不可放進洗衣機內或浸於水中清洗，關機及拔掉插頭後可使用濕布除去污漬。清理後放於清涼地方涼乾，不可給陽光直接照射。

- 註：1) 清理後的充電發熱護膝帶必須乾透後才可使用；
- 2) 清理後的充電發熱護膝帶表面可能會產生毛粒。

包裝資料

- 充電發熱護膝帶
- 控制器連充電電池
- 充電電池袋
- 充電器連插頭
- 使用說明書

圖像說明

☒ 不可乾洗

☒ 不可使用機器烘乾

⚠ 不可漂染

☒ 不可放進洗衣機內或浸於水中清洗

☒ 不可熨燙

📖 請小心閱讀使用說明書

⚠ 護膝帶冷卻前，不可屈曲或對摺

☒ 不可用針或扣針戳穿充電發熱護膝帶

重要安全提示

※ 請保留使用說明書給將來翻閱。



- 請小心閱讀說明書。
- 不要用針或尖銳物品戳穿本產品。
- 充電發熱護膝帶：
 - 如在弄濕或潮濕狀態下請勿使用；
 - 如在屈曲或摺疊的狀態時，請勿使用；
 - 0-3歲小孩不能使用充電發熱護膝帶，因為他們對熱力敏感不足；
 - 大於3歲的小孩不能使用充電發熱護膝帶，除非家長已為充電發熱護膝帶完成設定或他們已受足夠的指示使用充電發熱護膝帶；
 - 不適用於對熱力反應遲緩的人士、小童或寵物；
 - 不適用於行動不便的人士；
 - 充電發熱護膝帶冷卻前，不可屈曲或對摺；
 - 當不使用時：a)讓充電發熱護膝帶完全冷卻後才能摺起；b)使用後，請把充電發熱護膝帶存於原有彩盒內，並收藏於低溫及乾燥的地方。不要將尖物刺損充電發熱護膝帶。
- 不要放太重或尖銳的物品在充電發熱護膝帶上，它們可能會導致充電發熱護膝帶內的發熱線損壞或屈曲(例如：行李箱)。
- 經常保持插頭及電線乾爽。
- 控制器會發出微熱，所以不要遮擋，以免過熱。
- 祇能對某程度熱力作出反應的人士或病人，只可於監管下才可使用充電發熱護膝帶。
- 對熱力反應遲緩的人士及對過熱無法作出反應的非常弱勢人士，不可使用充電發熱護膝帶。
- 如產品本身或配件受損，請勿使用。
- 經常檢查本產品。如發現有任何損壞，例如電源線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。
- 充電發熱護膝帶不適用於醫院或作醫療用途。
- 使用完畢，請拔掉插頭。
- 不要把其他發熱產品或物品放於使用中的充電發熱護膝帶上或附近。
- 如小童使用時，請常經留意及監督。
- 在沒有成人監督的情況下，小童不可使用充電發熱護膝帶。
- 如電線損毀，應立即停止使用，並交由指定維修服務中心檢查及修理。

注意：

本機不是為體質、感覺或智力有障礙人士(包括小孩)或缺乏經驗及知識者使用，除非他們曾經接受負責安全人士的監督或指示。大人應指導小孩不可把玩電器。

技術參數

型號： HP-K58
交流電： 100-240伏特~50-60赫茲/8.4伏特

本產品含有可回收材料，不可把本產品作為未分類廢物。請聯繫當地就近指定回收點。

保用

本產品自購買日起一年免費保用(商業用途全機享有三個月免費保用)。此保用只包含生產所導致的品質問題；並不包括其附件、因誤用或不依說明書指示使用而導致的損壞。

***額外3個月保用：凡於購買產品後10天內完成網上登記，即可免費延長保用期3個月，即15個月免費保用(商業用途除外)。

請即登入網站：www.origin.hk

※ 所有保用條款，以中文版本為準。

注意：保用時，須帶同收據及請先致電服務中心。

服務中心

源澤市務有限公司
香港新界葵涌青山公路403號
匯城集團大廈21樓H室(近華星街12號)
電話：2156 8238

辦公時間

上午10:30 - 下午12:30 (星期一至五)
下午02:30 - 下午05:30 (星期一至五)
上午10:30 - 下午12:30 (星期六)
(星期日及公眾假期休息)

Warranty

This product is guaranteed for 1 year (commercial use for 3 months), from the date of receipt against manufacturing defect. The warranty does not cover the accessories, damage or defect caused by negligence or use not according to this instruction manual.

***Extra 3 months warranty: just complete Online Warranty Registration within 10 days from the date of receipt, free warranty will be extended to 15 months (not applicable to commercial use). Please enter our website: www.origin.hk

※ If there is any discrepancy of terms of warranty, the Chinese version shall prevail.

Remark: For any repair service, please contact and bring with the invoice or receipt to the Service Centre.

Service Centre

ORIGIN MARKETING LIMITED
Unit H 21/F, Reason Group Tower
(nearby 12 Wah Sing Street),
403 Castle Peak Road,
Kwai Chung, N.T., HK.
Tel: 2156 8238
www.origin.hk

Office Hour

10:30am - 12:30pm (Mon to Fri)
02:30pm - 05:30pm (Mon to Fri)
10:30am - 12:30pm (Saturday)
(Closed on Sunday and Public Holiday)



源澤地圖/Origin Map

